


4. Gastrostomiekatheters

De gastrostomiekatheter met ballon wordt steeds meer gebruikt als eerste plaatsing van een voedingskatheter. Daarnaast kan de gastrostomiekatheter ook worden gebruikt als vervangingskatheter voor een PEG-katheter.

Cobra Medical heeft een speciale introductie voor de directe plaatsing van een gastrostomiekatheter. In hoofdstuk 2 staat hierover meer beschreven.

Bij de gastrostomiekatheter ligt de ballon over de tip heen, zodat het maagslijmvlies niet geïrriteerd raakt. De katheter is gemaakt van veredelde siliconen en daardoor huidvriendelijk en soepel. Het externe huidplaatje is zo gemaakt dat er voldoende lucht bij de stoma komt, waardoor huidirritatie zoveel mogelijk wordt voorkomen.

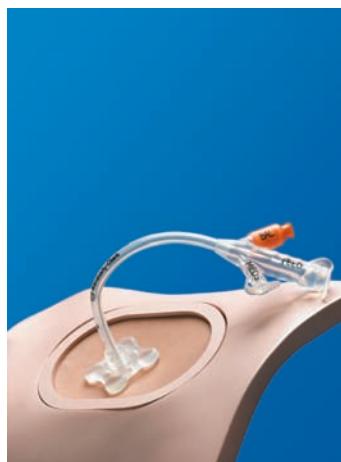

Verzorgingstips

Onder de naam 'Tipparades' heeft Cobra Medical een verkorte opsomming van de belangrijkste verzorgingstips per voedingskatheter samengesteld. De adviezen in deze tipparades kunnen afwijken van protocollen die ziekenhuizen, instellingen of andere organisaties hanteren.

MIC-Gastrostomiekatheter Tipparade

Verzorging

- Was altijd eerst uw handen voor u de MIC-Gastrostomiekatheter gaat verzorgen;
- Indien onder de MIC-Gastrostomiekatheter een gaasje wordt gebruikt, maak dan gebruik van een splitgaasje en verwissel deze driemaal daags;
- Controleer de stoma dagelijks op roodheid, zwelling en dergelijke;
- Controleer om de twee weken de hoeveelheid water in de ballon en vul zonodig bij.

Voeding en / of medicatie toedienen

- Spuit vóór het toedienen van voeding of medicatie de MIC-Gastrostomiekatheter door met 10 cc lauw water om de doorgankelijkheid van de MIC-Gastrostomie-katheter te controleren;
- Spuit na toediening van voeding of medicatie de MIC-Gastrostomiekatheter door met 10 cc lauw water.

Verwisselen / Plaatsen

- Zet alle benodigdheden voor het verwisselen of plaatsen van de MIC-Gastrostomiekatheter klaar;
- Zorg altijd voor schone handen voordat de MIC-Gastrostomiekatheter verwisseld of geplaatst wordt;
- Haal het water uit de ballon van de MIC-Gastrostomiekatheter met de bijgeleverde spuit;
- Controleer of de verwijderde hoeveelheid water overeenkomt met de eerder in de ballon ingebrachte hoeveelheid en verwijder dan de MIC-Gastrostomiekatheter;
- Maak met lauw kraanwater en een gaasje de opening schoon. Let op: maak altijd schoon met een ronddraaiende beweging vanaf de opening naar de buitenkant;
- Gebruik het bijgeleverde glijmiddel op waterbasis bij de stoma en doe zonodig nog wat glijmiddel op de nieuwe MIC-Gastrostomiekatheter;

- Breng de MIC-Gastrostomiekatheter rustig in;
- Houd de MIC-Gastrostomiekatheter vast tijdens het plaatsen en vul de ballon met de voorgeschreven hoeveelheid water (5-7 cc);
- Test door 20 cc water via de MIC-Gastrostomiekatheter in de maag te laten lopen of de MIC-Gastrostomiekatheter goed in de maag is geplaatst.

Wat niet te doen?

- Vul de ballon nooit met meer dan 10 cc water;
- Gebruik geen oliehoudend glijmiddel: dit kan de ballon beschadigen;
- Tijdens het gebruik kan de ballon verkleuren door maagsappen en medicatie. Dit is normaal. Boen de ballon nooit schoon met agressieve middelen die het materiaal kunnen aantasten, maar spoel de katheter met water schoon.

Onderstaande beschrijving van de plaatsing van een PEG-katheter is algemeen en gebaseerd op patiënteninformatie in brochures van een vijftal grote Nederlandse ziekenhuizen. De procedure in uw ziekenhuis kan daarom afwijken.

Vorbereiding

De arts bepaalt hoe lang vóór de ingreep u nuchter moet zijn en niet meer mag roken. Tijdens de ingreep kan de arts de maagwand goed bekijken, omdat er geen voedsel meer in de maag aanwezig is.

Informeert u uw arts altijd over uw medicijngebruik. Gebruikt u insuline of tabletten in verband met diabetes mellitus? Dan is het zeer waarschijnlijk dat uw medicatie zal worden aangepast. Ook moet u misschien helemaal stoppen met medicijnen, bijvoorbeeld als u ontstekingsremmende en of pijnstillende medicatie neemt, bloedverdunners of anti-reumamiddelen. Uw arts kan u vertellen wanneer u precies moet stoppen met het nemen van deze medicatie. Tot slot is het belangrijk om uw arts te informeren als u overgevoelig bent voor antibiotica.

Vlak voor de ingreep wordt er een infuus ingebracht, waardoor antibiotica, spierverslappende- of kalmeringsmiddelen kunnen worden toegediend. Tevens wordt eventuele buikbeharng tot tien centimeter rond de prikplaats weggeschoren. Ook moet u eventuele gebitsprothesen vóór het onderzoek uitdoen. Het bijtblok, dat u in uw mond krijgt, dient als bescherming voor uw gebit en voor de gastroscoop.

Kinderen

De arts spreekt met u als ouder af of uw kind voor de ingreep moet stoppen met bepaalde medicijnen.