


COBRA NIEUWS



FEBRUARI 2011

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET LAATSTE COBRA NIEUWS? MELD U DAN OP ONZE WEBSITE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

VOOR U LIGT HET RADIOLOGIE-KATERN VAN DE EERSTE COBRA NIEUWS VAN 2011,
SPECIAAL VOOR RADIOLOGEN EN INKOPERS VAN ZIEKENHUIZEN.

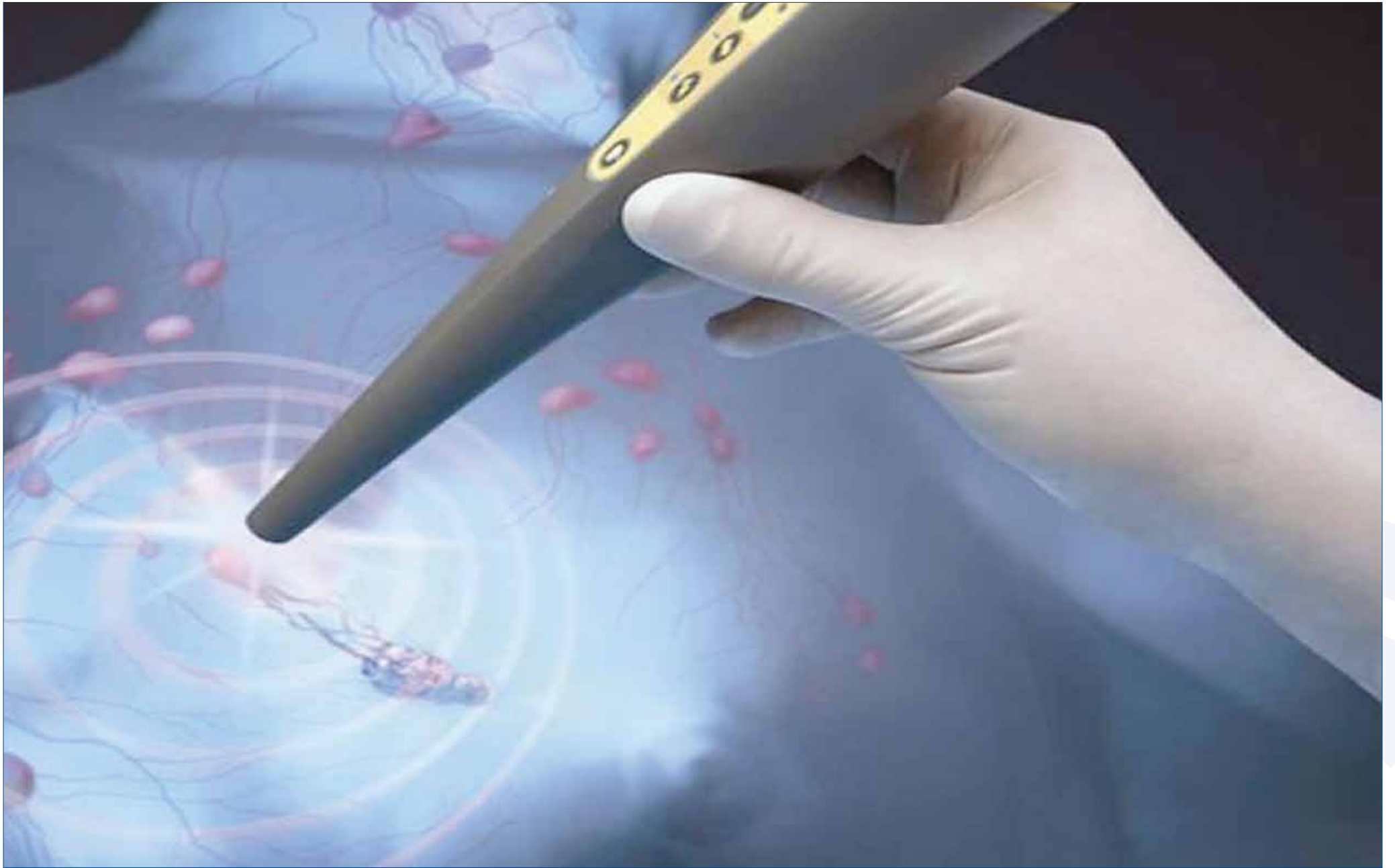

Gamma Finder II van World of Medicine, zie pagina 4

2010 was een bewogen jaar voor Cobra Medical. Op het gebied van de radiologie staat Cobra Medical bepaald niet stil! Nog nooit hebben we in zo'n snel tempo ons assortiment uitgebreid met nieuwe productgroepen, nieuwe producten én verbeterde producten! In de zomer van 2010 zijn wij gestart met het testen van diverse nieuwe producten. Ook zijn we distributeur geworden van een aantal nieuwe producten. Een korte opsomming:

- De firma BIP heeft voor ons een marker geleverd, met daarin een nitinolring die zichtbaar blijft onder ultrasound;
- Uiteraard hebben we ook veel markers van andere merken, onder andere de BiomarC GOLD van Vigeo en een longmarker van Somatex;
- BIP heeft ook een hele mooie disposable biopsy gun;
- Wij hebben het distributeurschap voor de Intact verworven. De naam zegt het al: met dit apparaat kunnen grote, intacte biopten worden genomen, of kunnen laesies in 't geheel worden verwijderd;
- Van World of Medicine komt de Gamma Finder II, waarmee de poortwachtklier (Sentinel Node) wordt opgespoord bij borstkanker en melanomen;
- Lokalisatiedraden leveren wij in vele soorten en maten en van diverse leveranciers;
- In ons assortiment hebben we ook MRI-producten van NORAS;
- Het Italiaanse bedrijf Medax heeft hard aan haar productlijnen gewerkt en komt met een aantal nieuwe en vernieuwde biopsienaalden. Ook zijn er nieuwe folders en catalogi.

OVER COBRA MEDICAL

Cobra Medical is distributeur van medische hulpmiddelen en apparatuur en levert producten aan ziekenhuizen, facilitaire bedrijven, instellingen en apothekers in Nederland, België en Luxemburg. Als specialist in patiëntvriendelijke oplossingen bieden wij complete pakketten op het gebied van endoscopie, **radiologie, (borst)biopsie**, urologie en bronchoscopie. Wij beschikken over een goed opgeleid team. Dit team adviseert en begeleidt u bij het gebruik van de apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen. Bij alle medewerkers van onze organisatie staat voortdurend één ding voor ogen: het belang van de patiënt.

CATALOGUS

Omdat wij weten dat veel artsen liever een catalogus erbij pakken als ze een product nodig hebben, hebben wij onze radiologiecatalogus geüpdate met de nieuwste producten. Mocht u interesse hebben in een exemplaar van deze catalogus, dan kunt u een e-mail sturen naar info@cobramedical.nl. We brengen 'm graag bij u langs!

WEBSITE

In deze krant informeren wij u in vogelvlucht over de nieuwste ontwikkelingen. Alle producten in ons assortiment kunt u uiteraard terugvinden op onze website onder Producten/Radiologie. Kijk op WWW.COBRAMEDICAL.NL voor meer informatie. Naast productinformatie opzoeken en beeldmateriaal bekijken kunt u op onze site ook digitale brochures downloaden.

Leveranciers waar wij mee samenwerken op het gebied van Radiologie zijn: Allwin Medical, Biopsy Sciences, BIP, Intact, Kimberly-Clark, Medax, Noras, Ranfac, Somatex, Vigeo en World of Medicine.



BIOPSIE

INTACT BREAST LESION EXCISION SYSTEM (BLES)-SYSTEEM

Het eerste apparaat in Nederland maakt deel uit van de zogenaamde Mammastraat in het UMC Utrecht.


The mission of Intact Medical Corporation is to market, design and develop innovative minimally invasive systems for the volumetric excision of tissue for diagnostic and therapeutic applications in select cancer markets. Initial products will be targeted at breast biopsy.

Op WWW.INTACTMEDICAL.COM staan diverse filmpjes die demonstreren hoe het BLES-systeem werkt.

Cobra Medical is distributeur geworden van het Breast Lesion Excision System van Intact. Met dit apparaat kan in één introductie borstweefsel worden verzameld ten behoeve van histologisch onderzoek. Bijzonder aan het systeem is dat het werkt met RF-energie (radiofrequentiesignalen) als snijmechanisme. Dankzij de drie verschillende maten wands (een soort mandje dat door de RF-draden wordt gevormd) is het mogelijk om, in plaats van meerdere kleine biopten, één groot, intact biopt te nemen.

Een van de grootste voordelen is dat de kans op chirurgische ingrepen naderhand kleiner is, omdat de laesie in z'n geheel kan worden verwijderd tijdens de biopsieprocedure. Andere voordelen zijn:

- Procedure duurt slechts enkele seconden;
- Systeem kan zowel worden gebruikt in combinatie met een stereotactisch systeem, alsmede echogeleid;
- Keuze uit drie afmetingen: 12 mm, 15 mm en 20 mm.

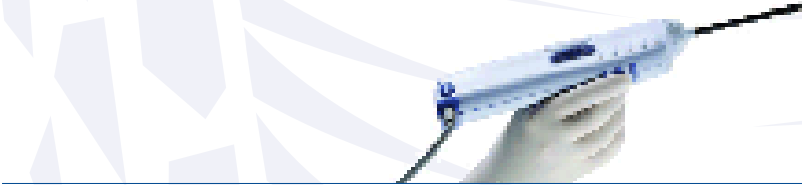

BLES-systeem



Driver & wand



Tip



RF-drads



'Opvangmandje'

Artikelnummer	Eenheid	Omschrijving
777-112BT	5	Wand (de naald met het 'mandje') 12 mm
777-115BT	5	Wand (de naald met het 'mandje') 15 mm
777-120BT	5	Wand (de naald met het 'mandje') 20 mm
777-007A	15	Vacuum Tubing
777-019	15	Grounding Pad
040203	10	BiomarC Marker for Mammotome 11G
040228	10	BiomarC Marker for Atec 9G and EnCor 10G

MEDAX

BIOPSIEPRODUCTEN



Universal 14G



Universal Duo 20G



Universal Plus 14G



Facile 16G

Het Italiaanse bedrijf MEDAX s.r.l. werd opgericht in 2003 en is gevestigd in Poggio Rusco, bij Bologna. Direct vanaf het begin al waren de kernactiviteiten van de onderneming gericht op de productie van biopsiegerelateerde producten voor radiologisch gebruik. De divisiedirecteur, Nicola Camellini Moretti, stelt het bedrijf graag aan u voor.

"De biopsielijn van Medax kan grofweg worden opgesplitst in de productgroep 'Soft Tissue Biopsy' en 'Bone Marrow Biopsy'. Naast een breed assortiment bieden wij per product een uitgebreide maatvoering aan: wij zijn in staat om onze naalden op elke gewenste lengte te leveren. Ondertussen staat de ontwikkeling van nieuwe producten niet stil. Zo hebben we nu ook de Hemax beenmergpunctienaald, het Handlex beenmergaspiratiesysteem en de Bio Feather, een semi-automatisch veergeladen biopsienaald met een notchlengte van 1,0 en 2,2 cm."

MEDAX SOFT-TISSUE DISPOSABLE BIOPSIE-NAALDEN (UN-, UP-, UD- EN FC-SERIE)
Op het gebied van soft-tissue biopsie leveren wij een groot aantal verschillende disposable biopsie-naalden van Medax, die gebruikt kunnen worden in combinatie met verschillende merken reusable guns.

De Universal naaldenlijn van Medax bestaat uit de Universal (UN-serie), de Universal Plus (UP-serie) en de Universal Duo (UD-serie). Daarnaast heeft Medax de Facile-naald (FC-serie). Deze disposable biopsie-naald is geschikt voor het nemen van histologische

biopten uit zacht weefsel en wordt gebruikt in combinatie met de NEXTAGE biopsy gun van Medax.

EIGENSCHAPPEN
Alle naalden uit de Universal-series en de Facile-serie hebben de volgende eigenschappen:

- Centimetermarkering;
- Uitstekende zichtbaarheid onder echo dankzij bewerkte tip;
- Versterkte naaldholte, waardoor buigen wordt voorkomen;
- Verkrijgbaar in vijf verschillende Gauge-maten, variërend van 14G tot en met 21G;
- Standaard verkrijgbaar in acht verschillende lengten, variërend van 80 mm tot en met 300 mm (maatwerk is mogelijk, tot een lengte van 300 cm. Er geldt dan wel een minimale afname).

BOVENDIEN:

- Voor alle bovengenoemde naalden zijn bijbehorende coaxiale naalden verkrijgbaar;
- Van al deze naalden is, naast een gewone versie, ook een versie met trocar-tip beschikbaar.

Artikelnummer	Lengte	Eenheid	Maat in Gauge	Kleur
UN / UP / UD / FC14 080-00	80mm	10	14G	donkergroen
UN / UP / UD / FC14 100-00	100mm	10	14G	donkergroen
UN / UP / UD / FC14 120-00	120mm	10	14G	donkergroen
UN / UP / UD / FC14 160-00	160mm	10	14G	donkergroen
UN / UP / UD / FC14 180-00	180mm	10	14G	donkergroen
UN / UP / UD / FC14 200-00	200mm	10	14G	donkergroen
UN / UP / UD / FC14 250-00	250mm	10	14G	donkergroen
UN / UP / UD / FC14 300-00	300mm	10	14G	donkergroen
UN / UP / UD / FC16 080-00	80mm	10	16G	wit
UN / UP / UD / FC16 100-00	100mm	10	16G	wit
UN / UP / UD / FC16 120-00	120mm	10	16G	wit
UN / UP / UD / FC16 160-00	160mm	10	16G	wit
UN / UP / UD / FC16 180-00	180mm	10	16G	wit
UN / UP / UD / FC16 200-00	200mm	10	16G	wit
UN / UP / UD / FC16 250-00	250mm	10	16G	wit
UN / UP / UD / FC16 300-00	300mm	10	16G	wit
UN / UP / UD / FC18 080-00	80mm	10	18G	roze
UN / UP / UD / FC18 100-00	100mm	10	18G	roze
UN / UP / UD / FC18 120-00	120mm	10	18G	roze
UN / UP / UD / FC18 160-00	160mm	10	18G	roze
UN / UP / UD / FC18 180-00	180mm	10	18G	roze
UN / UP / UD / FC18 200-00	200mm	10	18G	roze
UN / UP / UD / FC18 250-00	250mm	10	18G	roze
UN / UP / UD / FC18 300-00	300mm	10	18G	roze
UN / UP / UD / FC20 080-00	80mm	10	20G	geel
UN / UP / UD / FC20 100-00	100mm	10	20G	geel
UN / UP / UD / FC20 120-00	120mm	10	20G	geel
UN / UP / UD / FC20 160-00	160mm	10	20G	geel
UN / UP / UD / FC20 180-00	180mm	10	20G	geel
UN / UP / UD / FC20 200-00	200mm	10	20G	geel
UN / UP / UD / FC20 250-00	250mm	10	20G	geel
UN / UP / UD / FC20 300-00	300mm	10	20G	geel
UN / UP / UD / FC21 080-00	80mm	10	21G	lichtgroen
UN / UP / UD / FC21 100-00	100mm	10	21G	lichtgroen
UN / UP / UD / FC21 120-00	120mm	10	21G	lichtgroen
UN / UP / UD / FC21 160-00	160mm	10	21G	lichtgroen
UN / UP / UD / FC21 180-00	180mm	10	21G	lichtgroen
UN / UP / UD / FC21 200-00	200mm	10	21G	lichtgroen
UN / UP / UD / FC21 250-00	250mm	10	21G	lichtgroen
UN / UP / UD / FC21 300-00	300mm	10	21G	lichtgroen

UNIVERSAL DUO

De Universal Duo heeft nog een paar belangrijke, kenmerkende eigenschappen: Deze naald is beschikbaar in twee varianten: 'P' en 'B' (voor gebruikt met ProMag Gun of BARD-gun). De naald is voorzien van een connector voor een spuitje. Ook heeft de Universal Duo biopsienaald een opvallende 'vleugel'. Dankzij deze toevoeging kan de naald in de gun worden geklikt -en na gebruik uit de gun worden verwijderd- zonder de naald te hoeven aanraken. Hygiënisch én veilig in gebruik!

COMPATIBILITEIT

Naald:	Voor gebruik met reusable biopsy gun:
Medax Universal biopsienaald	• Angiotech/Pro-mag™ 2.2 biopsy gun / InterV Pro-mag™ 2.2 • BARD® BIOPTY® • Gallini/ABS • US Biopsy/MBD-23
Medax Universal Plus biopsienaald	Bard/Magnum™
Medax Universal Duo biopsienaald versie 'B'	Bard/Magnum™
Medax Universal Duo biopsienaald versie 'P'	Angiotech /Pro-Mag Ultra 2.5™
Medax Facile biopsienaald	• Medax Nextage reusable biopsy gun • Zonder gun (manueel)



Medax FNA-naalden



Medax Hepax Kit (Menghini)

WIST U DAT:

- Medax de naalden uit de Universal- en Facile-serie in elke gewenste lengte kan leveren (tot een maximale lengte van 300mm), dus ook in een lengte van 130 mm?

De artikelnummers van de meest verkochte soorten zijn:

- UPI4 130-00
- UNI4 130-00
- UPI6 130-00
- UNI6 130-00
- UPI8 130-00
- UNI8 130-00

- Medax ook een mooie serie FNA-naalden levert? Er zijn vijf soorten. De Chiba- en de Quinke-naald worden gebruikt voor cytologische aspiratie en het plaatselijk toedienen van verdoving; de Westcott-, Franseen- en Turner-naald zijn bedoeld voor cytologische en micro-histologische biopsieprocedures, om een meer nauwkeurige diagnose te kunnen stellen. Alle FNA-naalden van Medax hebben een luer-lockaansluiting en zijn voorzien van een centimetermarkering. De 01-serie heeft een speciale behandeling ondergaan, waardoor de naalden echografisch zichtbaar zijn. **Kijk voor meer informatie op onze website bij Producten/Biopsie/Soft tissue biopsy/Medax FNA-naalden.**

- Medax de Hepax Kit in het assortiment heeft, ook wel Menghini Kit genoemd? De Hepax Kit van Medax is hét instrument om een histologische aspiratieprocedure in zachte weefsel uit te voeren, zoals de lever, zonder echografische beeldvorming. De kit bevat een spuit van 10 cc met een zelf-vastklikkend systeem, om een constant vacuüm te garanderen, een ultradunne, scherp geslepen canule van een hoge kwaliteit staal voor een gecontroleerde penetratie en histologische aspiratie, een scalpel om het percutaan inbrengen van de naald te vergemakkelijken en een injectienaald. **Kijk voor meer informatie op onze website bij Producten/Biopsie/Soft tissue biopsy/Medax Hepax Kit.**



REUSABLE EN DISPOSABLE BIOPSY GUNS



MEDAX NEXTAGE REUSABLE BIOPSY GUN

De sterke Nextage reusable biopsy gun van Medax wordt gebruikt voor het nemen van biopsien uit zacht weefsel, in combinatie met de Medax Facile biopsienaald.

De compacte, lichtgewicht gun weegt slechts 215 gram en is voorzien van twee triggers: een aan de voorzijde en een aan de achterzijde. De laadprocedure is simpel en veilig dankzij de veiligheidspal. Met de hefboom aan de voorzijde kan de grootte van de biopsiekamer naar wens worden aangepast: 15mm of 22mm. Verder is de gun voorzien van indicatoren (canule en stylet), zodat iedere stap in het laadproces kan worden bewaakt.

Artikelnummer: **NEXTAGE-00/N.**

BIP HISTOCORE DISPOSABLE BIOPSY GUN (HC-SERIE)


Artikelnummer	Lengte	Eenheid	Maat in Gauge	Kleur
HC12100	100 mm	Doos à 6 stuks	12G	2.3 mm
HC12130	130 mm	Doos à 6 stuks	12G	2.3 mm
HC12160	160 mm	Doos à 6 stuks	12G	2.3 mm
HC12200	200 mm	Doos à 6 stuks	12G	2.3 mm
HC14100	100 mm	Doos à 6 stuks	14G	2.1 mm
HC14130	130 mm	Doos à 6 stuks	14G	2.1 mm
HC14160	160 mm	Doos à 6 stuks	14G	2.1 mm
HC14200	200 mm	Doos à 6 stuks	14G	2.1 mm
HC16100	100 mm	Doos à 6 stuks	16G	1.65 mm
HC16130	130 mm	Doos à 6 stuks	16G	1.65 mm
HC16160	160 mm	Doos à 6 stuks	16G	1.65 mm
HC16200	200 mm	Doos à 6 stuks	16G	1.65 mm
HC16250	250 mm	Doos à 6 stuks	16G	1.65 mm
HC18100	100 mm	Doos à 6 stuks	18G	1.25 mm
HC18130	130 mm	Doos à 6 stuks	18G	1.25 mm
HC18160	160 mm	Doos à 6 stuks	18G	1.25 mm
HC18200	200 mm	Doos à 6 stuks	18G	1.25 mm
HC18250	250 mm	Doos à 6 stuks	18G	1.25 mm
HC20100	100 mm	Doos à 6 stuks	20G	0.95 mm
HC20130	130 mm	Doos à 6 stuks	20G	0.95 mm
HC20160	160 mm	Doos à 6 stuks	20G	0.95 mm
HC20200	200 mm	Doos à 6 stuks	20G	0.95 mm
HC20250	250 mm	Doos à 6 stuks	20G	0.95 mm

Al meer dan 20 jaar ontwikkelt de Duitse firma BIP (kort voor Biomed. Instrumente & Produkte GmbH) borst-biopsieapparatuur. Zo heeft BIP bijvoorbeeld de Magnum en Vacora guns ontwikkeld. BIP focust hierbij op vier voorwaarden: universeel, makkelijk in gebruik, veilig en optimale resultaten.

BIP HISTOCORE DISPOSABLE BIOPSY GUN (HC-SERIE)

De eisen die aan biopsieapparatuur worden gesteld door ziekenhuishygiënist worden steeds strenger. Zo komt het steeds vaker voor dat reusable biopsy guns niet langer mogen worden schoongemaakt, maar naar de CSA moeten. Dit is kostbaar! Gelukkig zijn er disposable biopsy guns van zeer goede kwaliteit, bijvoorbeeld die van de Duitse firma BIP. Niet voor niks wordt deze gun wel de 'Magnum Light' genoemd. De guns hebben niet alleen een heel sterk veermechanisme, ze zijn prijstechnisch ook interessant. Bovendien kan de BIP HistoCore worden geleverd met coaxiaalnaald. Deze is met één hand los te maken van de gun.

De HistoCore heeft een handig locksysteem. De scherpe naald van sterk staal, met verbeterde tip, is simpel te plaatsen en goed te manipuleren. De maatvoering is zeer uitgebreid, met naalden die variëren in dikte van 12G (!) tot en met 20G. Er kan gekozen voor diverse lengten, variërend van 100 mm t/m 250 mm. Dankzij de beschikbaarheid van een groot aantal verschillende maten naalden is de HistoCore geschikt voor biopsieprocedures in ieder soort zacht weefsel, ten behoeve van histologisch onderzoek.

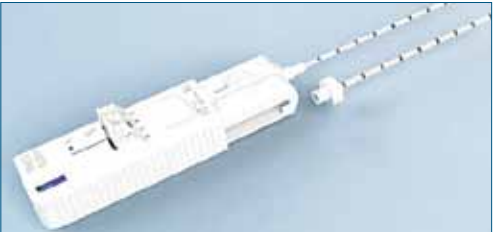

BIP HistoCore

VOORDELEN:

- Handzaam: het instrument weegt slechts 45 gram, is 123 mm lang en is met één hand te bedienen (spannen en losmaken). De voorgemonteerde coaxiaalnaald is met één hand los te maken;
- Uitstekende slagkracht: het krachtige, veergedreven schietmechanisme is vergelijkbaar met dat van een reusable gun;
- Keuze tussen automatisch en semi-automatisch biopteren: dit verhoogt de weefselopbrengst aanzienlijk;
- **Diepte kan naar wens worden ingesteld (18/25 mm);**
- Sterke naald die niet buigt;
- **12G naald zit standaard in het assortiment;**
- Minimale ruimte tussen de notch en de tip: de kortere naald(tip) veroorzaakt minder trauma aan het weefsel achter de laesie;
- Veilig in gebruik: de gebruiksmodus van het apparaat (cocked, semi-cocked of uncocked) wordt weergegeven op de statusindicator. Daarnaast is de gun voorzien van geïntegreerde triggerbescherming (aan beide zijden van de biopsy gun).

MEDAX CAESAR DISPOSABLE
BIOPSY GUN (CS-SERIE)

De volautomatische, veergeladen Caesar biopsy gun is voorzien van twee triggers (aan de voorzijde en aan de achterzijde). Dit 'guillotine-stijl' biopsiesysteem wordt gebruikt op urologie, chirurgie, CT en echografie voor het nemen van histologische biopten uit zacht weefsel. De lichtgewicht, compacte gun is gebruiksvriendelijk, veilig in gebruik en kan met één hand worden bediend.

NIEUW:TWEE DIEPTES!



RANFAC SNARECORE FULL CORE BIOPSY INSTRUMENT (FCB-SERIE)

Dit disposable, full-core biopsie-instrument wordt vaak ingezet bij urologie- of borstbiopsieprocedures. Op a-traumatische manier kunnen grote, intacte biopten worden genomen. Er is een 14G- en een 18G-variant. Voor beide zijn ook coaxiaalnaalden beschikbaar.

Deze 'gun-met-naald' is uitgerust met het gepatenteerde SNARECOIL-mechanisme. Hierbij wordt het biopt tijdens het terugtrekken 'afgesneden' en in de naald gefixeerd.



Artikelnummer	Omschrijving	Maat in Gauge	Bijzonderheden	Eenheid
FCB-1410	SNARECORE biopsie-instrument	14G - 10 cm	Throw: 22	5
FCB-1415	SNARECORE biopsie-instrument	14G - 15 cm	Throw: 22	5
FCB-1810	SNARECORE biopsie-instrument	18G - 10 cm	Throw: 22	5
FCB-1815	SNARECORE biopsie-instrument	18G - 15 cm	Throw: 22	5
FCB-1820	SNARECORE biopsie-instrument	18G - 20 cm	Throw: 22	5
FCI-1410	SNARECORE coaxiale introducer naald	13G	Voor gebruik met FCB-1410	10
FCI-1415	SNARECORE coaxiale introducer naald	13G	Voor gebruik met FCB-1415	10
FCI-1810	SNARECORE coaxiale introducer naald	17G	Voor gebruik met FCB-1810	10
FCI-1815	SNARECORE coaxiale introducer naald	17G	Voor gebruik met FCB-1815	10
FCI-1820	SNARECORE coaxiale introducer naald	17G	Voor gebruik met FCB-1820	10

Artikelnummer	Lengte	Eenheid	Maat in Gauge	Kleur
CS14 080-00	80mm	10	14G	donkergroen
CS14 100-00	100mm	10	14G	donkergroen
CS14 120-00	120mm	10	14G	donkergroen
CS14 160-00	160mm	10	14G	donkergroen
CS14 180-00	180mm	10	14G	donkergroen
CS14 200-00	200mm	10	14G	donkergroen
CS14 250-00	250mm	10	14G	donkergroen
CS14 300-00	300mm	10	14G	donkergroen
CS16 080-00	80mm	10	16G	wit
CS16 100-00	100mm	10	16G	wit
CS16 120-00	120mm	10	16G	wit
CS16 160-00	160mm	10	16G	wit
CS16 180-00	180mm	10	16G	wit
CS16 200-00	200mm	10	16G	wit
CS16 250-00	250mm	10	16G	wit
CS16 300-00	300mm	10	16G	wit
CS18 080-00	80mm	10	18G	roze
CS18 100-00	100mm	10	18G	roze
CS18 120-00	120mm	10	18G	roze
CS18 160-00	160mm	10	18G	roze
CS18 180-00	180mm	10	18G	roze
CS18 200-00	200mm	10	18G	roze
CS18 250-00	250mm	10	18G	roze
CS18 300-00	300mm	10	18G	roze
CS20 080-00	80mm	10	20G	geel
CS20 100-00	100mm	10	20G	geel
CS20 120-00	120mm	10	20G	geel
CS20 160-00	160mm	10	20G	geel
CS20 180-00	180mm	10	20G	geel
CS20 200-00	200mm	10	20G	geel
CS20 250-00	250mm	10	20G	geel
CS20 300-00	300mm	10	20G	geel
CS21 080-00	80mm	10	21G	lichtgroen
CS21 100-00	100mm	10	21G	lichtgroen
CS21 120-00	120mm	10	21G	lichtgroen
CS21 160-00	160mm	10	21G	lichtgroen
CS21 180-00	180mm	10	21G	lichtgroen
CS21 200-00	200mm	10	21G	lichtgroen
CS21 250-00	250mm	10	21G	lichtgroen
CS21 300-00	300mm	10	21G	lichtgroen

DETECTEREN:
GAMMA FINDER II

Het Duitse World of Medicine, gevestigd in Berlijn, is al 30 pionier op het gebied van medische producten voor minimaal invasieve chirurgie. In 2003 sloot het bedrijf een groot contract af met een Amerikaanse firma voor de verkoop van de Gamma Finder. Cobra Medical is sinds kort distributeur van dit product in Nederland, België en Luxemburg.



DE GAMMA FINDER II IN HET KORT:

- Snoerloos;
- Compact: makkelijk te vervoeren van operatiekamer naar operatiekamer;
- Lichtgewicht (210 gr);
- Werkt op batterij tot 300 uur;
- Single-step set-up;
- Steriele disposable 'sleeves';
- One-Touch activatie;
- LCD-scherm;
- Ten second count: keuze uit cumulatief of gemiddeld;
- Binary Pitch Mode
- Isotope detectiemogelijkheden: 99mTc, 123I, 111In, 57Co, 131I;

De Gamma Finder II is voor Cobra Medical geen onbekend product: De eerste variant werd ook al door Cobra Medical op de markt gebracht in de Benelux. Nu is er de Gamma Finder II, met nóg meer voordelen voor zowel arts als patiënt. Cobra Medical's Account Manager Anja Westerhof vertelt:

“Het apparaat is zeer compact (20 x 5 cm) en is het enige snoerloze 'hand-held'-systeem dat wordt gebruikt voor het snel en kostenefficiënt opsporen van verdachte kankercellen. Deze procedure wordt gebruikt bij borst-, huid-, maag- en baarmoederhalskanker. Ook kan de Gamma Finder II worden ingezet voor onderzoek van darmen en prostaat.”

De Gamma Finder II van World of Medicine is de eerste draadloze gammaprobe en wordt gebruikt om de poortwachtklier (Sentinel Node) op te sporen bij borstkanker en melanomen.

Wetenschappers hebben ontdekt dat kanker zich uitbreidt via de lymfeklieren. De eerste lymfeklier die afvalstoffen uit de borst (en dus uit een eventuele aanwezige tumor) afbreekt, is de poortwachtklier. Is deze poortwachtklier schoon, dan is er reden om aan te nemen dat

de kanker niet is uitgezaaid. Alle lymfeklieren hoeven dan niet te worden verwijderd.

Om de poortwachtklier op te sporen, worden er isotopen (blue dye) geïnjecteerd in de borst. Deze blauwe kleurstof verspreidt zich richting de poortwachtklier en de klieren daarboven. De isotoop geeft straling af (gamma wave), die door een gammanaald, de Gamma Finder II, kan worden gedetecteerd. De kleine, lichtgewicht probe is heel gevoelig voor gammastraling en kan eenvoudig door de chirurg worden bediend om de poortwachtklier op te sporen.

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid
G102-01	Gamma Finder® II	1
Z5085-01	Steriele 'sleeves'	50

LOKALISEREN

Als specialist op het gebied van mamma-radiologie wil Cobra Medical een zo compleet mogelijk productassortiment aanbieden. Lokalisatiedraden mogen dan ook niet ontbreken.

LOKALISATIEDRADEN

Lokalisatiedraden worden gebruikt om de exacte positie van een afwijking te markeren, die chirurgisch moet worden verwijderd. De dunne, soepele metalen draad wordt door een radioloog in de tumor geplaatst met behulp van een naald, waarin de lokalisatiedraad zit. Het draadje heeft weerhaakjes, waardoor het goed op zijn plaats blijft zitten als de naald wordt teruggetrokken. Op de plaats waar het draadje uit de borst komt, wordt het op de huid vastgeplakt tot het moment van de operatie.

Cobra Medical heeft een uitgebreid assortiment lokalisatiedraden van de volgende leveranciers:

- Twee soorten SINUREP-lokalisatiedraden van Medax;
- Drie soort Somatex-systemen;
- Drie soorten Breast Systems van Ranfac;
- ALM-sets van HS (Hospital Service S.p.A.).


MEDAX LOKALISATIEDRADEN (SINUREP-SERIE)

Medax levert niet-verwijderbare lokalisatiedraden onder de naam SINUREP. Er zijn verschillende soorten:

- Enkelhaaks (SINUREP L) of dubbelhaaks (SINUREP N);
- Met of zonder markeringen;
- Met of zonder versteviging.

Het product wordt geleverd inclusief naald (voorzien van markeringen voor een nauwkeurige dieptebepaling en positiebepaling van de haak), een stopper en lokalisatiedraad.

Deze borstlokalisatiedraden hebben een dikte van 0,25 mm en zijn verkrijgbaar in vier verschillende lengten: 6, 8, 12 en 16 cm. De transparante, ergonomische luer-lock connector zorgt voor een veilige procedure.

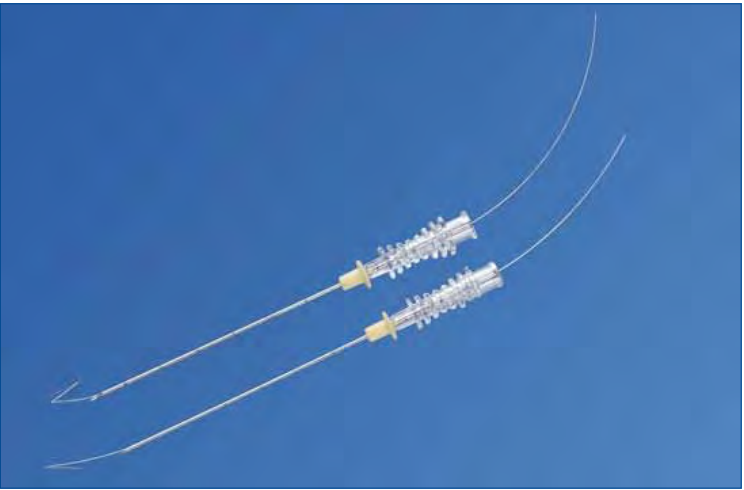


Artikelnummer	Type	Maat in Gauge	Diameter draad in mm	Diameter canule in cm
SR20060-00	Enkelhaaks	20 G	0.25mm	6
SR20060-01	Dubbelhaaks	20 G	0.25mm	6
SR20060-02	Enkelhaaks met markering	20 G	0.25mm	6
SR20060-03	Dubbelhaaks met markering	20 G	0.25mm	6
SR20060-04	Enkelhaaks met versteviging	20 G	0.25mm	6
SR20060-05	Dubbelhaaks met versteviging	20 G	0.25mm	6
SR20080-00	Enkelhaaks	20 G	0.25mm	8
SR20080-01	Dubbelhaaks	20 G	0.25mm	8
SR20080-02	Enkelhaaks met markering	20 G	0.25mm	8
SR20080-03	Dubbelhaaks met markering	20 G	0.25mm	8
SR20080-04	Enkelhaaks met versteviging	20 G	0.25mm	8
SR20080-05	Dubbelhaaks met versteviging	20 G	0.25mm	8
SR20120-00	Enkelhaaks	20 G	0.25mm	12
SR20120-01	Dubbelhaaks	20 G	0.25mm	12
SR20120-02	Enkelhaaks met markering	20 G	0.25mm	12
SR20120-03	Dubbelhaaks met markering	20 G	0.25mm	12
SR20120-04	Enkelhaaks met versteviging	20 G	0.25mm	12
SR20120-05	Dubbelhaaks met versteviging	20 G	0.25mm	12
SR20160-00	Enkelhaaks	20 G	0.25mm	16
SR20160-01	Dubbelhaaks	20 G	0.25mm	16
SR20160-02	Enkelhaaks met markering	20 G	0.25mm	16
SR20160-03	Dubbelhaaks met markering	20 G	0.25mm	16
SR20160-04	Enkelhaaks met versteviging	20 G	0.25mm	16
SR20160-05	Dubbelhaaks met versteviging	20 G	0.25mm	16

SOMATEX LOKALISATIEDRADEN

Cobra Medical heeft ervoor gekozen om de volgende drie soorten lokalisatiedraad van de firma SOMATEX in haar assortiment op te nemen:

1. Tuloc;
2. Mamma Duo System;
3. Duo System Premium.

Deze lokalisatiedraden hebben een dubbele haak en zijn herpositioneerbaar.

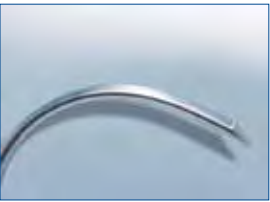

TULOC

Artikelnummer	Type	Maat in Gauge	Diameter draad in mm	Lengte
271 660	Dubbelhaaks	20 G	0,95 mm	50 mm
271 661	Dubbelhaaks	20 G	0,95 mm	90 mm
271 663	Dubbelhaaks	20 G	0,95 mm	120 mm

MRI TULOC

Artikelnummer	Type	Maat in Gauge	Diameter draad in mm	Lengte
601 649	Dubbelhaaks	20 G	0,95 mm	90 mm
601 651	Dubbelhaaks	20 G	0,95 mm	120 mm


SOMATEX TULOC LOKALISATIESYSTEEM (271-SERIE & 601-SERIE)

Tuloc is bestemd voor de preoperatieve markering van verdachte, non-palpabele laesies in de borst en helpt de chirurg intro-operatief. Het Tuloc lokalisatiesysteem van Somatex is het meest simpele en daardoor ook het meest voordelige lokalisatiesysteem van Somatex.

Het systeem is simpel en nauwkeurig in gebruik en bovendien a-traumatisch voor de patiënt. Daarnaast is het Tuloc lokalisatiesysteem bovengemiddeld goed zichtbaar onder echo.

De belangrijkste eigenschappen van Tuloc zijn:

- Monofilamentdraad;
- Repositioneerbaar: indien herpositionering nodig is, kan de lokalisatiedraad gemakkelijk worden teruggetrokken in de canule en opnieuw worden geplaatst;
- De extreem scherpe beveled tip van zowel de canule als de draden garandeert een soepele penetratie, waardoor Tuloc ook geschikt is voor gebruik in dicht tumorweefsel;
- Kans op dislocatie is minimaal: de laser-cut dubbele bogen en het verstelbare fixatiegedeelte staan garant voor een sterke verankering in het tumorweefsel;
- Ook de veiligheidsstop voorkomt dislocatie;
- Gebruikte materiaal en de boogvormen zorgen samen voor een goede zichtbaarheid onder echo en voor goede voelbaarheid;
- Dieptemarkeringen tonen informatie over de afstand tot de distale tip van de draad: de radioloog en de chirurg maken gebruik van de twee distale markeringen.

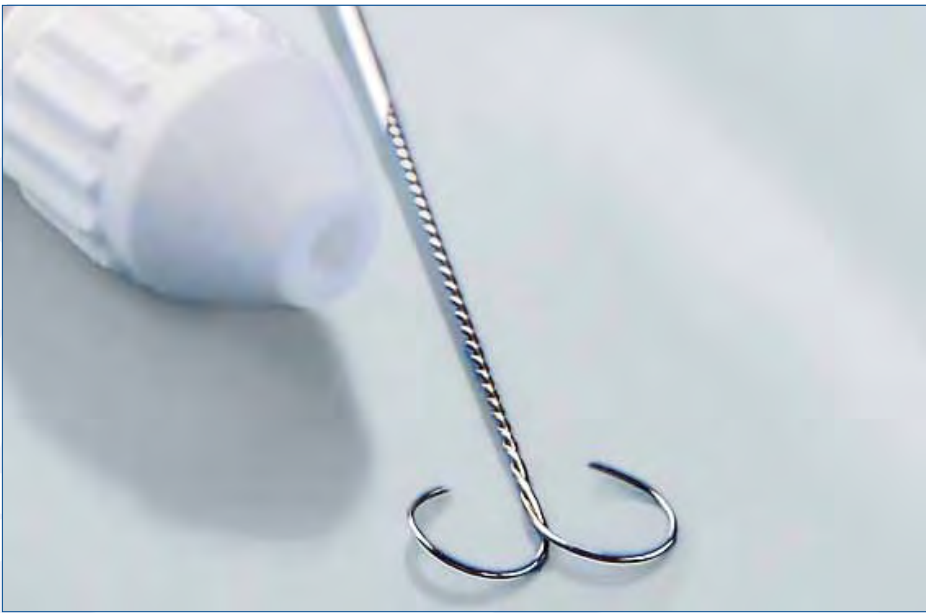

SOMATEX

MAMMA DUO SYSTEM (27I-SERIE & 60I-SERIE)

STANDARD & MRI DUO SYSTEM

Het SOMATEX Duo-systeem is een corrigeerbare lokalisatieset voor de preoperatieve markering van niet-voelbare, verdachte borstklierlaesies. Zo kan de chirurg de locatie eenvoudig terugvinden voor de operatie. Als een herpositionering nodig is, kan de markeer-draad eenvoudig worden teruggetrokken in de canule en opnieuw worden gebruikt voor een verdere markering.

Het MRI Duo System is speciaal ontwikkeld voor MRI-geleide toepassing.

VOORDELEN:

- Corrigeerbare markeerdraad;
- Uitstekend zichtbaar onder echo;
- Geen dislocatie dankzij de duo-bogen;
- Scherpe draadtips voor harde laesies;
- Hoge draadflexibiliteit;
- Het fixatiegedeelte maakt een veilige preoperatieve fixatie van de draad mogelijk.

STANDARD-DUO-SYSTEM

Artikelnummer	Type	Maat in Gauge	Diameter draad in mm	Lengte
27I 440	Dubbelhaaks	19,5 G	0,95 mm	50 mm
27I 441	Dubbelhaaks	19,5 G	0,95 mm	90 mm
27I 443	Dubbelhaaks	19,5 G	0,95 mm	120 mm

MRI-DUO-SYSTEM

Artikelnummer	Type	Maat in Gauge	Diameter draad in mm	Lengte
60I 607	Dubbelhaaks	20 G	0,9 mm	50 mm
60I 609	Dubbelhaaks	20 G	0,9 mm	90 mm
60I 611	Dubbelhaaks	20 G	0,9 mm	120 mm
60I 629	Dubbelhaaks	18 G	1,2 mm	90 mm
60I 631	Dubbelhaaks	18 G	1,2 mm	120 mm



SOMATEX

SOMATEX DUO SYSTEM PREMIUM LOKALISATIESYSTEEM (27I-SERIE)

Het Duo System Premium lokalisatiesysteem van Somatex is een corrigeerbaar lokalisatie-systeem voor mammografie. Het biedt artsen en patiënten topkwaliteit, absolute betrouw-baarheid en het hoogste comfort voor de preoperatieve markering van verdachte weefsel.

DUO System Premium is bijzonder gebruiksvriendelijk voor echogeleide behandelingen, omdat het met één hand kan worden toegepast. Hierdoor kan de gebruiker de lokalisatie-draden plaatsen en tegelijkertijd de transducer hanteren.

Het verwijderbare handvat van het Duo System Premium vormt een wezenlijke bijdrage aan de mammografieprocedure.

Dankzij de speciale vorm kan de lokalisatiedraad, als een herpositionering nodig is, op een-voudige wijze worden teruggetrokken in de canule. De dubbele bogen garanderen sterke verankering in het weefsel, waardoor dislocatie in willekeurige richting wordt voorkomen. Door de markeringen op de draad is het duidelijk waar de gemarkeerde laesie zich bevindt.

VOORDELEN:

- Met één hand te bedienen;
- Afneembare canule;
- Corrigeerbare, zeer flexibele lokalisatiedraad;
- Stevige verankering in het weefsel dankzij de duo-bogen;
- Scherpe draadtips voor toepassing in harde laesies;
- Diepte- (centimeter-)markeringen, zowel op de canule als op de draad;
- Optimale zichtbaarheid onder echo dankzij echografiemarkeringen op de canule en de echografisch bewerkte tip;
- Bevestigingsgedeelte garandeert veilige, preoperatieve verankering van de lokalisatiedraad.

DUO-SYSTEM-PREMIUM

Artikelnummer	Type	Maat in Gauge	Diameter draad in mm	Lengte
27I 770	Dubbelhaaks	20 G	0,95 mm	50 mm
27I 771	Dubbelhaaks	20 G	0,95 mm	90 mm
27I 773	Dubbelhaaks	20 G	0,95 mm	120 mm

RANFAC

LOKALISATIEDRADEN & BORSTSYSTEMEN

Van Ranfac leveren wij een drietal verschillende lokalisatiesystemen:

- Breast Marking Systems;
- Breast Bracketing Systems;
- Breast Orientation System.

Sommige van deze lokalisatiedraden van Ranfac worden geleverd met een stiffening canule. Deze canule wordt tijdens de biopsie over de draad geplaatst en fungeert als indicator van de draad-richting en van de locatie van de draadtip.

Overige voordelen voor de chirurg zijn:

- De canule geeft een indicatie van de draad-richting;
- Door gebruik van de canule wordt voor-komen dat de draad per ongeluk wordt afgeknipt.



RANFAC

BREAST MARKING SYSTEMS (SBS-SERIE & REL-SERIE)

Het Ranfac Breast Marking System is een compleet pakket, bestaande uit:

- een steriele 20 Gauge dunne wand-naald;
- flexibel 0,010 inch lokalisatiedraad;
- een unieke stiffening canule.

De flexibele lokalisatiedraad wordt in de borst van de patiënt geplaatst. Het uitwendige deel wordt op de borst van de patiënt vastgeplakt.

De SBS-serie wordt geleverd inclusief stiffening canule, de REL-serie zonder:

RANFAC BREAST MARKING SYSTEMS

Artikelnummer	Maat in Gauge	Lengte	Stiffening canule
SBS-5	20 G	50 mm	23 G x 4 cm stiffening canule
SBS-7.5	20 G	75 mm	23 G x 5 cm stiffening canule
SBS-10	20 G	100 mm	23 G x 6 cm stiffening canule
REL-5	20 G	50 mm	Exclusief
REL-7.5	20 G	75 mm	Exclusief
REL-10	20 G	100 mm	Exclusief
SC-x stiffening canule, x = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cm			



RANFAC


BREAST BRACKETING SYSTEM (RBS-SERIE)

Breast Bracketing (Borst voorzien van haakje) is een concept dat al meer dan 20 jaar bestaat. Hierbij worden meerdere aangesloten draden rond de omtrek van een laesie geplaatst. Voordeel ten opzichte van enkelhaakse lokalisatiedraden: de kans is kleiner dat de chirurg opnieuw moet snijden of de hele borst moet verwijderen (mastectomie).

De RBS-serie wordt geleverd met stiffening canule. Iedere verpakking bestaat verder uit twee 20 Gauge naalden met een lengte van 5, 7,5 of 10 cm met centimetermarkeringen, twee 7", 8" of 9" spring-hook lokalisatiedraden met markering en twee 23 Gauge stiffening canules met een lengte van 4, 5 of 6 cm.

RANFAC BREAST BRACKETING SYSTEM (RBS-SERIE)

Artikelnummer	Maat in Gauge	Lengte	Stiffening canule
RBS-5	20 G	50 mm	23 G x 4 cm stiffening canule
RBS-7.5	20 G	75 mm	23 G x 5 cm stiffening canule
RBS-10	20 G	100 mm	23 G x 6 cm stiffening canule

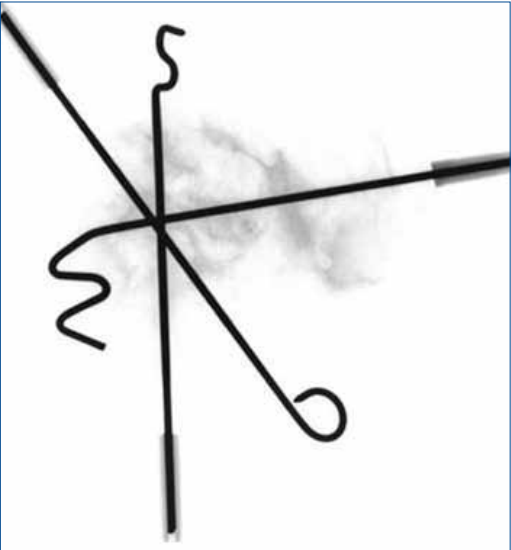

RANFAC

BREAST ORIENTATION SYSTEM (ROS-12)

Het Ranfac Breast Orientation System is ontworpen voor de driedimensionale oriëntatie van een biologisch weefselmonster voor beoordeling door de patholoog.


- KENMERKEN
- Er zijn drie 0.030 draden, met aan het eind een M-, S- en P-vorm (de letters staan voor Mediaal, Superior en Posterior). Deze naalden met draden worden dwars door de laesie heen ingebracht. De chirurg bepaalt zelf de volgorde waarin ze worden ingebracht, maar de letters bepalen vanuit welke hoek. Dit systeem levert een driedimensionale oriëntatie van het biopt op, variërend in grootte tot een maximale doorsnede van 12 cm.

- De draden hebben twee inkepingen en kunnen eenvoudig worden afgebroken door ze 90° te draaien. De draden moeten in dat geval wel worden voorzien van een plastic kapje om onbedoeld losraken te voorkomen.
- Indien de letteraanduiding correct wordt toegepast door de chirurg, geeft dit systeem zelf automatisch al informatie over de ligging van de laesie. Het gebruik van dit systeem elimineert communicatiefouten tussen de chirurg en de verpleegkundige en op de afdeling pathologie.

RANFAC BREAST ORIENTATION SYSTEM (ROS-12)

Artikelnummer	Diameter draad in mm
ROS-12	.030

MARKEREN

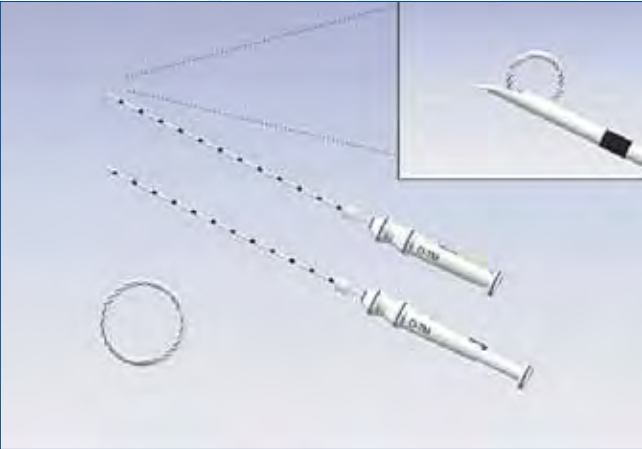

BIP O-Twist marker

BIP O-TWIST-MARKER (OTM-SERIE)

De O-Twist marker van BIP (Biomed. Instrumente & Produkte GmbH) wordt gebruikt voor het markeren van de holte in de borst, waar weefsel via een biopsieprocedure is weggenomen, of om de laesie te markeren. De marker, gemaakt van nitinol (bio-compatibel), kan geplaatst worden na een vacuümgeassisteerde biopsieprocedure of na een core biopsieprocedure. Ook kan de marker rechtstreeks worden geplaatst (neoadjuvante chemo).

Het BIP O-Twist markeersysteem is toepasbaar in combinatie met alle diagnostische methoden, zoals mammografie, echografie, maar ook MRI en CT. De gedraaide markering (ringvormig) zorgt voor een goede zichtbaarheid. Belangrijkste voordeel van de O-Twist marker: de marker is direct zichtbaar en blijft onder echografie ALTIJD zichtbaar. De marker verankert zich stevig in het weefsel, waardoor markermigratie wordt voorkomen.

De applicatie-tool is een scherpe 20G canule. Deze is ook ideaal voor een directe toepassing van de O-Twist marker (markering van laesies vóór het uitvoeren van een neoadjuvante chemotherapie).

- Er zijn twee soorten O-Twist markers verkrijgbaar, elk met een lengte van 157 mm:
- O-Twist marker met rechte canule;
 - O-Twist marker met gebogen canule-uiteinde.

BIP O-TWIST-MARKER (OTM-SERIE)

Artikelnummer	Type	Eenheid
OTM3.0SA	Rechte canule	Doos à 5 stuks
OTM3.0RA	Canule met gebogen tip	Doos à 5 stuks



Vigeo Biomarc introductiecanule

BIOMARC & BIOMARC GOLD VAN VIGEO

Vigeo Healthcare Solutions: A Young company recently founded to market, develop and supply high quality healthcare products.

Organized to reach a precise target: to be a solid reference point for those who are looking for a reliable and available partner for their business development while focusing on innovation and high quality interventional healthcare. Whether they are cost improvements for providers. Ease of use improvements for practioners. Or, most of all, comfort and efficacy enhancements for patients.

The company mission is supported by a continuous and updated study of new materials, being alongside the client during all the phases that involve the industrialization, design and production of all our products.



'Bot'-vorm

BIOMARC TISSUE MARKER (0402-SERIE & 0403-SERIE)

Van het Italiaanse Vigeo hebben wij twee markers in ons assortiment: De Biomarc en de Biomarc Gold.

De Biomarc is voorgeladen op een systeem met zijpoort en is compatibel met de meeste vacuüm-geassisteerde borstbiopsie-apparaten. De marker wordt gebruikt na vacuümgeassisteerde borstbiopsieprocedures, na core borstbiopsieprocedures en voor neoadjuvante borsttherapie. Klinische evaluatie heeft aangetoond dat de Biomarc niet migreert.

Het Biomarc markeersysteem is gemaakt van pyrolytische carbon-gecoate zirkoniumdioxide. De koolstofdeklaag is biologisch inert en bevat verscheidene unieke weergavekenmerken. De Biomarc is zichtbaar onder mammografie, stereotactie, echografie en, dankzij de niet-storende eigenschappen, ook onder MRI. Onder echografie is de Biomarc permanent zichtbaar.

Ook de fysieke kenmerken van de Biomarc zijn uniek: de onderscheidende 'bot'-vorm én afmetingen (2mm x 4mm) maken de Biomarc gemakkelijker te visualiseren.

BIOMARC TISSUE MARKER


Artikelnummer	Type	Lengte	Afmetingen marker
040203	Vigeo Biomarc Marker voor Mammotome IIG	16,53 cm	2 mm x 4 mm
040228	Vigeo Biomarc Marker voor Atec 9G en EnCor 10G	36,37 cm	2 mm x 4 mm



BIOMARC GOLD MARKER (0401-SERIE)

De BiomarC Gold weefselmarkeerder voor beeldgeleide radiotherapie is veilig, zichtbaar, accuraat en gemakkelijk terug te vinden op het röntgenbeeld. Dankzij de speciale, gekartelde vorm wordt migratie voorkomen.

- Deze goudmarker wordt gebruikt:
- Vóór aanvang van radiotherapie van de prostaat;
 - Tijdens brachytherapie.

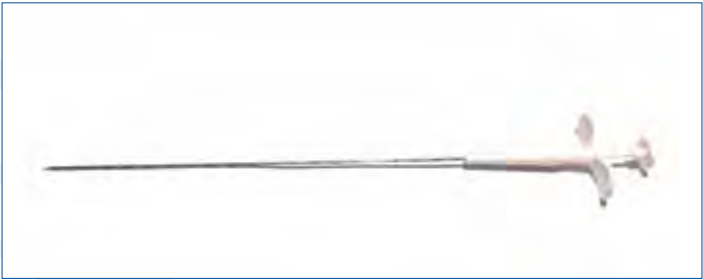

BIOMARC GOLD MARKER (0401-SERIE)

Artikelnummer	Type	Afmetingen marker
040116	Vigeo BiomarC GOLD Marker standard met 'bone wax'	1,2 mm x 3 mm
040118	Vigeo BiomarC GOLD Marker 'hands-free' zonder 'bone wax'	1,2 mm x 3 mm

TUMARK FLEX & LUNG MARKER VAN SOMATEX


True to our company philosophy: PERMANENT PRODUCT INNOVATION

SOMATEX® is a specialist company developing, manufacturing and sales minimal invasive disposable high-quality instruments for vertebroplasty, tumor ablation, tumor diagnostic, mammography and antenatal medicine.

SOMATEX® sets its focus on developing innovative special products and new instruments based on what physicians precisely need. Since 1992, the company constantly develops new medical therapy concepts and realizes them in their products in close cooperation with physicians, hospitals and university clinics.

Its focus is set on methods and instruments allowing minimally invasive operations using magnetic resonance imaging. In the past few years, Somatex has also intensified its activities aiming at the development of new procedures and instruments used to treat painful vertebral compression fractures, for example caused by osteoporosis.

VAN DE DUITSE FIRMA SOMATEX LEVEREN WIJ STEEDS MEER PRODUCTEN, WAARONDER EEN AANTAL MARKERS.

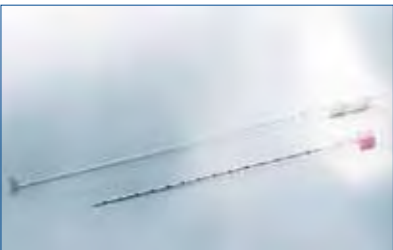

De canule met de spiraalvormige marker en de punctienaald

SOMATEX TUMARK FLEX VOOR ATEC VACUÛM BIOPSIESYSTEEM (271-SERIE)

De Tumark Flex marker wordt gebruikt voor het markeren van de lokatie waar met behulp van het ATEX vacuÛmbiopsiesysteem weefsel wordt weggenomen. De Tumark Flex is gemakkelijk in te brengen in de ATEC biopsienaald met behulp van een adapter. De marker van nitinol is uitstekend zichtbaar onder echografie, mammografie en MRI. Het slimme 3D-ontwerp zorgt voor een stevige verankering in het weefsel.

SOMATEX TUMARK FLEX VOOR ATEC VACUÛMBIOPSIESYSTEEM (271-SERIE)

Artikelnummer	Maat in Gauge
271 574	12 G
271 576	9 G

SOMATEX LUNG MARKER SYSTEM (272-SERIE)

Het SOMATEX LUNG MARKER systeem wordt gebruikt voor de CT-geleide markering van niet-zichtbare ronde laesies in de buurt van het borstvlies voor videogeassisteerde thoroscopische chirurgie.

- Voordelen van het Somatex longmarkeersysteem:
- Draadsysteem kan worden gecorrigeerd dankzij de coaxiale canule laadtechniek;
 - CT-fluoroscopie maakt het lokaliseren eenvoudig;
 - Betrouwbare verankering dankzij speciale spiraalvorm;
 - Diameter 18 Gauge;
 - Geen tijdsdruk tussen het markeren en videogeassisteerde thoroscopische chirurgie.

SOMATEX LUNG MARKER SYSTEM (272-SERIE)

Artikelnummer	Maat in Gauge	Diameter draad in mm	Lengte
272 012	18G	1,2 mm	120 mm
272 015	18G	1,2 mm	150 mm

NEFROSTOMIE

(NIER- EN URINEWEGDRAINAGE)

Allwin Medical is gevestigd in Orange County, Californië, in de Verenigde Staten. De oprichters hebben meer dan 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Kijkend naar de stijgende kosten van de gezondheidszorg is het ons doel om betaalbare producten te bieden aan artsen en patiënten over de hele wereld. Wij geloven in kwaliteit tegen betaalbare prijzen.

Allwin Medical is gespecialiseerd in urologieproducten, maar levert ook producten op het gebied van radiologie, gastro-enterologie en bronchoscopie.

Onze hardlopers onder de nefrostomieproducten van Allwin Medical zijn:

- Direct Puncture Drainage set;
- Armada Fasciale Dilatoren;
- Armada Renal Dilator set (set met nierdilatoren).




DIRECT PUNCTURE DRAINAGE SET (DPD-SERIE)

De Direct Puncture Drainage Set van Allwin Medical wordt gebruikt voor percutane nefrostomie na de 'directe punctie'-techniek, in het bijzonder bij een hydronefrose. De katheter is geladen op een tweedelige Trocar Naald en wordt vervolgens rechtstreeks ingebracht via een incisie in de huid. Deze procedure rekent af met het gebruik van de voerdraad en de fasciale dilatoren, omdat er geen dilatatie wordt verricht. De set kan ook worden gebruikt voor de drainage van cysten en abcessen.

DIRECT PUNCTURE DRAINAGE SET (DPD-SERIE)

Artikelnummer	Maat in French
DPD - 7	7 French
DPD - 8	8 French
DPD - 9	9 French
DPD - 10	10 French

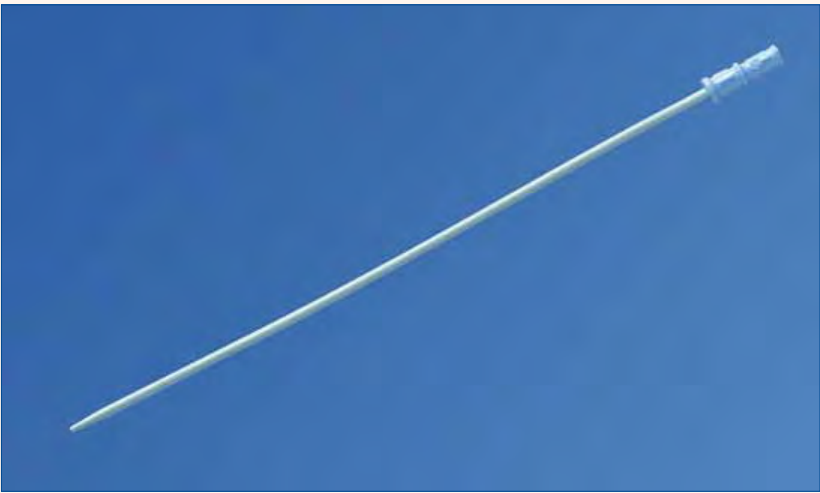

ARMADA FASCIALE DILATATOREN (AFD-SERIE)

De Armada fasciale dilatoren worden over de voerdraad gebruikt, voor de dilatatie van het percutane traject. Ze zijn er in vele maten, uiteenlopend van 6 French tot en met 16 French. Daarnaast zijn ze in sets verkrijgbaar:

ARMADA FASCIALE DILATATOREN (AFD-SERIE)

Artikelnummer	Omschrijving	Maat in French	Lengte in cm
AFD 6/10	Set ARMADA Fasciale Dilatoren, bestaande uit de volgende maten: 6, 7, 8, 9 en 10 French	6 t/m 10 French	20
AFD 8/16	Set ARMADA Fasciale Dilatoren, bestaande uit de volgende maten: 8, 10, 12, 14 en 16 French	8 t/m 16 French	20
AFD 6	ARMADA Fasciale Dilator	6 French	20
AFD 7	ARMADA Fasciale Dilator	7 French	20
AFD 8	ARMADA Fasciale Dilator	8 French	20
AFD 9	ARMADA Fasciale Dilator	9 French	20
AFD 10	ARMADA Fasciale Dilator	10 French	20
AFD 12	ARMADA Fasciale Dilator	12 French	20
AFD 14	ARMADA Fasciale Dilator	14 French	20
AFD 16	ARMADA Fasciale Dilator	16 French	20



ARMADA RENAL DILATOR SET (ARTIKELNUMMER ARDS 8/30)

De Armada Renal Dilatorset van Allwin Medical is een nefrostomieset die wordt gebruikt door chirurgen en interventie-radiologen voor nefrostomies: het aanleggen van een kunstmatige opening tussen de nier en de huid, door het nierparenchym heen, waardoor urine vanuit het bovenste deel van het urinale systeem (renal pelvis) kan worden afgevoerd. De set bestaat uit zes fasciale- en zes nierdilatoren, sheaths en een introductie-katheter voor de dilatoren van 14 French tot en met 30 French.

NIEUW!



Nieuw in ons assortiment is de Allwin AllSoft Renal Transplant Stent.

Deze niertransplantatiestent is bedoeld om de afvoer van urine vanuit de nier naar de blaas tijdelijk te vergemakkelijken.

Bijzonder is dat de kleinere French-maten ook in lengtematen tot 16 cm verkrijgbaar zijn.

ALLWIN ALLSOFT RENAL TRANSPLANT STENT

Artikelnummer	Omschrijving	Maat in French	Lengte in cm
RTS-C 6/12	Renal Transplant Stent Closed Tip	6 French	12
RTS-C 6/14	Renal Transplant Stent Closed Tip	6 French	14
RTS-C 6/16	Renal Transplant Stent Closed Tip	6 French	16
RTS-C 7/12	Renal Transplant Stent Closed Tip	7 French	12
RTS-C 7/14	Renal Transplant Stent Closed Tip	7 French	14
RTS-C 7/16	Renal Transplant Stent Closed Tip	7 French	16
RTS-C 8/12	Renal Transplant Stent Closed Tip	8 French	12
RTS-C 8/14	Renal Transplant Stent Closed Tip	8 French	14
RTS-C 8/16	Renal Transplant Stent Closed Tip	8 French	16
RTS-O 6/12	Renal Transplant Stent Open Tip	6 French	12
RTS-O 6/14	Renal Transplant Stent Open Tip	6 French	14
RTS-O 6/16	Renal Transplant Stent Open Tip	6 French	16
RTS-O 7/12	Renal Transplant Stent Open Tip	7 French	12
RTS-O 7/14	Renal Transplant Stent Open Tip	7 French	14
RTS-O 7/16	Renal Transplant Stent Open Tip	7 French	16
RTS-O 8/12	Renal Transplant Stent Open Tip	8 French	12
RTS-O 8/14	Renal Transplant Stent Open Tip	8 French	14
RTS-O 8/16	Renal Transplant Stent Open Tip	8 French	16

De set is ook met voerdraad verkrijgbaar.

WIST U DAT...




Kimberly-Clark PR/EG-set

- Cobra Medical, naast de lokalisatiedraden van Ranfac, ook nog een groot aantal biopsieproducten van dit merk levert? Bijvoorbeeld de SNARECOIL Bone Marrow biopsienaald (RBN-serie), die net als het SNARECORE Full Core Biopsy Instrument is voorzien van het gepatenteerde SNARECOIL-mechanisme. Bij deze naald hoeft nauwelijks te worden gedraaid of gemanipuleerd om een biopsie uit het beenmerg te nemen, wat de procedure vereenvoudigt.
- Wij van het merk NORAS apparatuur en accessoires voor MRI-geleide onderzoeken en behandelingen kunnen leveren? Op onze site kunt u de folder downloaden. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn MR-Coils, borstbiopsie en accessoires (zoals referentieblokken) voor MR-scanners. Deze producten van NORAS zijn te gebruiken met alle bestaande MRI-toestellen.
- De PR/EG (PRG) introductieset van Kimberly-Clark niet alleen door MDL-artsen, maar ook op de afdeling Radiologie kan worden ingezet? Bij deze methode wordt een voedingskatheter met ballonfixatiesysteem percutaan geplaatst. Er is een PR/EG-set voor ieder type ballonkatheter van Kimberly-Clark:
 - Set voor MIC gastrostomie voedingskatheter;
 - Set voor MIC-KEY voedingskatheter;
 - Set voor MIC jejunale en MIC transgastrische jejunale voedingskatheter;
 - Set voor MIC-KEY jejunale en MIC-KEY transgastrische jejunale voedingskatheter.

OP DE VALREEP!


- NIEUW IN ONS ASSORTIMENT VAN SOMATEX:
- Tuloc Premium corrigeerbare lokalisatiedraad, met één hand te bedienen;
 - Tumark Trio, een markeersysteem met drie markers;
 - Tumark Professional, waarvan ook een MRI-variant leverbaar is.

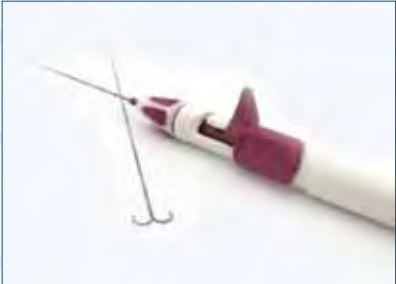

Tuloc Premium



Tuloc Trio

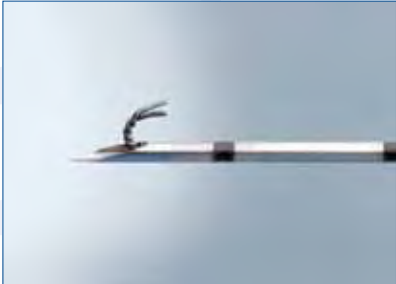

Tumark Professional



Tumark Professional

CONGRESSEN

Graag wijzen wij u op onderstaande congressen op het gebied van Radiologie, die in 2011 plaatsvinden in binnen- en buitenland.

Data	Titel	Plaats
21 januari 2011	Radiologische Interventiedag Nederland	Congrescentrum Reehorst Ede
28 - 29 januari 2011	IBDC 2011 - International Congress of Breast Disease Centers	Parijs (Frankrijk)
1 - 4 februari 2011	Sandwichcursus Teaching in Holland met met AIRP (American Institute of Radiologic Pathology)-sprekers	Congrescentrum Reehorst Ede
3 februari 2011	NVvOncologiedag: Borstkanker	Academiegebouw Utrecht
3 - 7 maart 2011	ECR 2011	Wenen (Oostenrijk)
3 - 6 april 2011	The Breast Course 2011	Renaissance Polat Istanbul Hotel Istanbul (Turkije)
3 - 8 april 2011	43rd IDKD International Diagnostic Course Davos	Davos (Zwitserland)
18 - 19 april 2011	Vaatdagen 2011	NH Leeuwenhorst Noordwijkerhout
19 - 20 mei 2011	NVMBR Jaarcongres 2011	Nijkerk
21 - 24 mei 2011	ESGAR 2011	Venetië (Italië)
14 - 15 juni 2011	9e Bossche Mamma Congres	Kasteel Maurick Vught
10 - 14 september 2011	CIRSE 2011	München (Duitsland)
22 september 2011	NVMBR Symposium MRI	Congrescentrum Reehorst Ede
6 oktober 2011	NVMBR Symposium Echografie	Congrescentrum Reehorst Ede
1 november 2011	NVMBR Symposium Radiologie	Congrescentrum Reehorst Ede
8 - 11 november 2011	Sandwichcursus nieuwe stijl Mammo-Thorax	Congrescentrum Reehorst Ede
12 november 2011	NVMBR Symposium Radiotherapie	Congrescentrum Reehorst Ede
27 november - 2 december 2011	RSNA 2011	Chicago Illinois (Verenigde Staten)



COBRA MEDICAL
Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland
Tel +31 (0) 50 528 04 98
Fax +31 (0)50 528 04 95

